



**JMC-C 3224 – 4 kerekű, fékkel ellátott járókeret**

**Használati útmutató**

### 1. Kód

JMC-C 3224 - 4 kerekű, fékkel ellátott járókeret

### 2. Használati cél

A JMC-C 3224 típusú járókeret stabilitást és biztonságos közlekedést nyújt mozgásukban korlátozott személyek számára..

#### 2.1 Bevezetés

A négykerekű, fékkel ellátott rollátor keresztirányban megerősített alumínium vázzal rendelkezik, elől forgó, hátul fix 5"-os kerekekkel, ergonomikus fogantyúkkal és kézifékekkel.

A magasság a felhasználó testmagasságához igazítható.

Összecsukható kialakításának köszönhetően kis helyet foglal, így könnyen tárolható és szállítható.

### 3. Általános figyelmeztetések

- A készülék helyes használata érdekében kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, és különösen figyelmesen tanulmányozza át a figyelmeztetéseket a használat megkezdése előtt.
- A csomagolt terméket tartsa távol hőforrásoktól, mivel a csomagolás kartonból készült.
- A tartozékok élettartamát az alkatrészek kopása határozza meg, melyek nem javíthatók és nem cserélhetők.
- Legyen óvatos, ha gyermekek tartózkodnak a közelben.
- Ne lépje túl a megengedett maximális teherbírást.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelenteni kell minden súlyos balesetet, amely az eszközzel kapcsolatban történt, a gyártónak és annak az országnak az illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy páciens tartózkodik.
- Mindig fordítson fokozott figyelmet a mozgó alkatrészek jelenlétére, mivel ezek a végtagok becsípődését vagy sérülését okozhatják

### 4. Szimbólumok

 Referenciaszám

 Gyártószám


 Sorozatszám


 Gyógyászati segédeszköz

 Gyártási dátum

 Gyártó

 Megjegyzések


 A gyártó igazolta az orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést

 Kérjük, olvassa el a használati útmutatót!

## 5. Összeszerelés és felépítés

### 5.1 Egyes részek

1. Foganytú
2. Kézifék
3. Összecsukható vázelem
4. Magasság állítása
5. Első, forgó kerék
6. Hátsó kerék

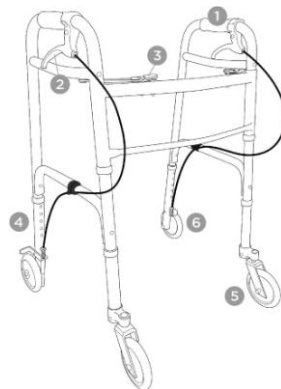

### 5.2 Szétnyitás és összecsukás

- Szétnyitás: Húzza szét a járókeret oldalsó elemeit a végső helyzetig, amíg a markolatok a helyükre nem pattannak (ezt egy jellegzetes kattanas hangja jelzi).
- Összecsukás: Nyomja meg az összecsukó mechanizmus gombját, amely a keresztirányú vázelem tetején található, majd hajtsa befelé az oldalsó részeket.

### 5.3 Magasságállítás

- A magasságot úgy kell beállítani, hogy a felhasználó egyenes testtartásban, lazán leengedett vállakkal és enyhén behajlított könyökkel támaszkodhasson a markolatokra. A járókeretre nem szabad teljes testsúllyal ránehezedni.
- A lábak magasságát a rögzítőcsap benyomásával lehet állítani: válassza ki a kívánt pozíciót, és rögzítse mind a négy lábat azonos magasságba. A magasságállítás 2,5 cm-es lépésekben történik.

**Megjegyzés: A biztosítócsapoknak minden lábon azonos magassági pozícióban kell lenniük!**

### 6. Karbantartás

- A járókeret vázát nedves ruhával, vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, majd alaposan törölje szárazra.
- Tilos használni a tisztításhoz: erős súrolószereket, erőteljes tisztítószereket, fehérítőt, benzint vagy oldószereket - ezek károsíthatják a vázát, esztétikai hibákat okozhatnak, valamint a garancia elvesztéséhez vezethetnek.
- Rendszeresen tisztítsa meg a járókeret mozgó részeit (csuklók, rögzítőcsavarok, záróelemek).

### 7. Tárolás

A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, víznek vagy nedvességnek.

### 8. Műszaki adatok

<b>Teljes szélesség</b>	54 cm
<b>Belső szélesség</b>	44 cm
<b>Teljes mélység</b>	61 cm
<b>Magasság állítása</b>	82-92 cm
<b>Súly</b>	3,77 kg
<b>Maximális teherbírás</b>	158 kg



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland  
T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: info@timago.com



UNIZDRAV Kft.  
Kelemen László utca 1.  
2900 Komárom  
Magyarország

Elérhetőségünk:  
0646/200-800  
info@unizdrav.hu  
www.unizdrav.hu



09/2024(I)