

A WC-szék szilárd, vízszintes padlón való használatra készült. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy alkalmasságával kapcsolatban, forduljon az eladóhoz vagy a felíróhoz. Ne lépje túl a felhasználó megengedett maximális súlyát vagy a segédeszköz maximális terhelhetőségét.

1. Helyezze a szék keretét sima felületre.
2. A WC csésze ergonomikus formájú, kellemes anyagból készült, vezetősínnel felszerelt, könnyen kivehető. Toal behelyezésekor, az ülőlapot el kell távolítani, hogy a tartályt a székbe helyezzük. Helyezze be a WC-csészét felülről.
3. Fordítsa el az ülésdeszkát úgy, hogy a műanyag fogantyúk lefelé mutassanak. Helyezze a szék keretére, és nyomja meg úgy, hogy a fogantyúk a helyükre pattanjanak. Helyezze a táblát az ülésre.
4. Az ülés eltávolítása: Húzza felfelé az ülés elülső szélét a bilincsekből, emelje fel az ülést és vegye ki.
5. A szék magasságának beállítása: távolítsa el a rögzítőcsapot, állítsa a lábat a kívánt magasságba, és nyomja vissza a csapot a megfelelő lyukba. Ismétlje meg mind a 4 lábba. A szék használata közben a lábakat azonos magasságba kell állítani.

Karbantartási utasítások

A WC csésze minden egyes használata után a csészét és az ülőkét alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Használjon szokásos fertőtlenítőszeret. Használjon szappanos oldatot a WC-kocsin. Tisztítsa meg az üléshezátot és a háttámlát meleg vízzel vagy közönséges tisztítószer hozzáadásával. Tisztítsa meg a műanyag részeket meleg vízzel, közönséges tisztítószer hozzáadásával.

Műszaki adatok

A szín kék

Ülésszélesség x mélység 44 x 44 cm

szék mérete (szélesség x mélység x magasság) 60 x 60 x 84 - 98 cm

Terhelhetőség 100 kg

Súly 8,5 kg