



JMC-C 3224 – 4 kerekű, fékkel ellátott járókeret

Használati útmutató

1. Kód

JMC-C 3224 - 4 kerekű, fékkel ellátott járókeret

2. Használati cél

A JMC-C 3224 típusú járókeret stabilitást és biztonságos közlekedést nyújt mozgásukban korlátozott személyek számára..

2.1 Bevezetés

A négykerekű, fékkel ellátott rollátor keresztirányban megerősített alumínium vázzal rendelkezik, elől forgó, hátul fix 5"-os kerekekkel, ergonomikus fogantyúkkal és kézifékekkel.

A magasság a felhasználó testmagasságához igazítható.

Összecsukható kialakításának köszönhetően kis helyet foglal, így könnyen tárolható és szállítható.

3. Általános figyelmeztetések

- A készülék helyes használata érdekében kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, és különösen figyelmesen tanulmányozza át a figyelmeztetéseket a használat megkezdése előtt.
- A csomagolt terméket tartsa távol hőforrásoktól, mivel a csomagolás kartonból készült.
- A tartozékok élettartamát az alkatrészek kopása határozza meg, melyek nem javíthatók és nem cserélhetők.
- Legyen óvatos, ha gyermekek tartózkodnak a közelben.
- Ne lépje túl a megengedett maximális teherbírást.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelteni kell minden súlyos balesetet, amely az eszközzel kapcsolatban történt, a gyártónak és annak az országnak az illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy páciens tartózkodik.
- Mindig fordítson fokozott figyelmet a mozgó alkatrészek jelenlétére, mivel ezek a végtagok becsípődését vagy sérülését okozhatják

4. Szimbólumok



Referenciaszám



Gyártószám



Sorozatszám



Gyógyászati segédeszköz



Gyártási dátum



Gyártó



Megjegyzések



A gyártó igazolta az orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést




Kérjük, olvassa el a használati útmutatót!

5. Összeszerelés és felépítés

5.1 Egyes részek

1. Foganytú
2. Kézifék
3. Összecsukható vázelem
4. Magasság állítása
5. Első, forgó kerék
6. Hátsó kerék

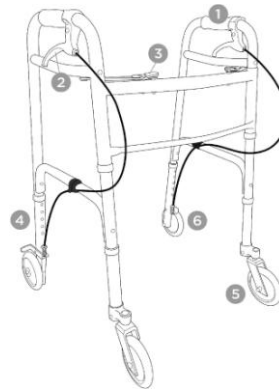

5.2 Szétnyitás és összecsukás

- Szétnyitás: Húzza szét a járókeret oldalsó elemeit a végső helyzetig, amíg a markolatok a helyükre nem pattannak (ezt egy jellegzetes kattánás hangja jelzi).
- Összecsukás: Nyomja meg az összecsukó mechanizmus gombját, amely a keresztirányú vázelem tetején található, majd hajtsa befelé az oldalsó részeket.

5.3 Magasságállítás

- A magasságot úgy kell beállítani, hogy a felhasználó egyenes testtartásban, lazán leengedett vállakkal és enyhén behajlított könyökkel támaszkodhasson a markolatokra. A járókeretre nem szabad teljes testsúllyal ránehezedni.
- A lábak magasságát a rögzítőcsap benyomásával lehet állítani: válassza ki a kívánt pozíciót, és rögzítse mind a négy lábat azonos magasságba. A magasságállítás 2,5 cm-es lépésekben történik.

Megjegyzés: A biztosítócsapoknak minden lábon azonos magassági pozícióban kell lenniük!

6. Karbantartás

- A járókeret vázát nedves ruhával, vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, majd alaposan törölje szárazra.
- Tilos használni a tisztításhoz: erős súrolószereket, erőteljes tisztítószerkeket, fehérítőt, benzint vagy oldószereket - ezek károsíthatják a vázát, esztétikai hibákat okozhatnak, valamint a garancia elvesztéséhez vezethetnek.
- Rendszeresen tisztítsa meg a járókeret mozgó részeit (csuklók, rögzítőcsavarok, záróelemek).

7. Tárolás

A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, víznek vagy nedvességnek.

8. Műszaki adatok

Teljes szélesség	54 cm
Belső szélesség	44 cm
Teljes mélység	61 cm
Magasság állítása	82-92 cm
Súly	3,77 kg
Maximális teherbírás	158 kg



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



UNIZDRAV Kft.
Kelemen László utca 1.
2900 Komárom
Magyarország

Elérhetőségünk:
0646/200-800
info@unizdrav.hu
www.unizdrav.hu



09/2024(I)

Koreai arcmaszk ceramidokkal, 30 ml Használati útmutató



Nem tartalmaz mikroműanyagokat, PEG-eket, szilikont, paraffint, allergéneket, ásványi olajokat, szulfátokat.
A CERA-BIOME megoldással készült krémes arcmaszk intenzíven hidratálja a bőrt, miközben erősíti annak természetes védőrétegét.

Használat

Vigye fel a maszkot egyenletesen az arcra. 10-20 perc múlva távolítsa el, majd a megmaradt esszenciát finoman paskolja a bőrbre.

Ingredients

Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ceramide NP, Ceramide AP, Lactobacillus Ferment, Bacillus Ferment, Aspergillus Ferment, Panthenol, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Methylpropanediol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, 1,2- Hexanediol, 04-22 Alcohols, Hydroxyacetoph enone, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), 02-20 Alkyl Glucoside, Carbomer, Arginine, Helian thus Annuus Seed Oil, Betaine, Ethylhexylglycerin, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Disodium EDTA Pelargonium Graveolens Flower Oil, Hydrogenated Lecithin, Glucose, Sea Water, Butylene Glycol, Ulmus Cam pestris Bark Extract Glycine Max Seed Extract Polyglyceryl-10 Stearate, Lactobacillus Ferment Lysate, Rose Flower Oil, Citronellol

Manufactured for. GP Europe GmbH, Westhafenplatz 1. 60327, Frankfurt am Main, Germany
EU R.P. OBELIS S.A - Bd General, Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium