

Kedves vásárló, köszönjük hogy nálunk vásárolt. A célunk az Ön elégettsége. Ezért szükséges a termék helyes használata, és karbantartása. Nagyon szükséges a termék helyes kiválasztása, hogy a használata kényelmes és kellemes legyen. Ez a termék egy egészségügyi segédeszköz, mely mindennapi használatra alkalmas.

Ha a termék más célokra van használva, mint amire volt gyártva nemterjed ki rá a garancia. A termék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen. Ha hibásnak tűnik a termék, ne használja a terméket, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A termék élettartalmát a használati mód és a gyakori használata adja meg. Az eladó nem felelős a termék helytelen használata esetén történő károkért.

Termékleírás:

Illítható a következő kád szélességhez: 52-től 61 cm-ig.

Figyelmeztetés:

- Használat előtt, olvassa el a használati utasítást. A termék használatával és alkalmasságával kapcsolatos kérdésekkel forduljon kezelőorvosához, vagy a forgalmazóhoz.
- Ez a termék nem helyezteti az orvosi vizsgálatot.
- Az eszközön megjelenő eredmények csak tájékoztató célokra szolgálnak, ezek alapján nem használhatók közvetlenül a diagnosztikai értelmezéshez, vagy a kezeléshez.
- Nehasználja a készüléket, ha kardiosztimátort használ. Kövesse az orvosa utasításait.
- Nehasználja a készüléket defibrillátorral egyidejűleg.
- Nehasználja a készüléket gyulladásos környezetben (oxigénre gazdag környezetben).
- Nemerítse vízbe, vagy más folyadékba. Netisztítsa oldószerekkel, vagy más gyulladásos oldatokkal.
- Vigyázzon a készülékre – ne essen le a földre.
- Neszterilizálja nyomás alatt, vagy gázokkal.
- Soha ne szerelje szét a készüléket – megsérülhet.
- A készüléket csak tapasztalt felnőttek használhatják, ne játszdjanak a gyerekek a készülékkel.
- Ügyeljenek arra, hogy az elektródák ne érintkezzenek más vezetőképes részekkel (beleértve a talajt is).
- Nehasználja a készüléket, ha érzékeny bőre, vagy allergiás.
- Ez a készülék a szívritmus, a vér oxigén tartalmát mutatja. Ha betegnek érzi magát, forduljon orvosához.
- Ha akármilyen eredményeket is mutat a készülék, forduljon kezelőorvosához. Különösen ne változtassa a meglévő gyógyszerek típusát, vagy adagolását.
- Ajánlatos az EKG görbéket bejegyezni, szükség esetén mutassa kezelőorvosának.
- Tiszta nedves ronggyal törölhető – nehasználjon oldószereket.
- Vérnyomás mérés folyamán, a manzsettával szorítsa a kezét, hogy ideglenesen gátolja a vér áramlását az artériából. Ez fájdalmat, zsibbanást, vagy átmenetileg pirosodást okozhat a kezén. Bármilyen fájdalom, zsibbanás, pirosodás az idő múlásával eltűnik.
- Nehasználja a készüléket, sebes kezek esetén.
- Nehasználja a készüléket vérátömlés esetén.

A csomagolás tartalma:

1. Ülőke szerkezettel (1db)
2. Rögzítő csavarok (4db)
3. Fogantyúk (4db)
4. Használati utasítás (1db)

Összeszerelési utasítás

1. Helyezze be a fogantyúkat az alumínium üléskereten található megfelelő nyílásokba úgy, hogy a fogantyú végei felfelé irányuljanak.
2. Állítsa be a fogantyútávolságot a kád belső szélességének megfelelően.
3. Rögzítse a fogantyúkat a szerkezetben a csavarok segítségével úgy, hogy azok áthaladjanak a lyukon keresztül és az ülészerkezeten, valamint a fogantyún keresztül is.
4. A terméket a használati utasítás szerint használja.

A fürdőkád pad maximálisan 110 kg-os testtömegű felhasználók számára készült. A termék túlterhelése tilos!

Technikai adatok:

Ülőke méretei	41 x 22 cm
Teljes magasság	16 cm
Állítható fogantyúk (a kád belső szélessége)	52 - 61 cm
Súly	1,5 kg
Terhelhetőség	110 kg

Használati utasítás:

A fürdőkádba be és kilépni óvatosan kell. A padra hátulról üljön. A lábait egyenként helyezze be a kádba. Üljön a pad közepén. Soha ne üljön a pad szélére, sem a pad fogantyújára

Karbantartás, és tisztítás

Nedves rongyal, és neutrális tisztítószerrel tisztítható. Ajánlatos fertőtleníteni minden használat után. Nehasználjon abrazív tisztítószereket, vagy oldószereket. Tartsa távol a hőforrásoktól, és a közvetlen napsugártól. Hűvös helyen, hőforrástól, például napfénytől távol, tárolandó (0 °C és 40 °C között).

GARANCIA

A forgalmazó garanciát vállal a termékre a végső fogyasztónak történő eladástól számított 24

hónapig.

A jótállás nem terjed ki a vevő által okozott hibákra:

- mechanikai sérülések (pl. a termék lyukasztása),
- nem megfelelő használat a használati útmutatóval ellentétesen,
- a termék javítása a jótállási időszak alatt,
- a termék nem megfelelő vagy helytelen karbantartása a jótállás teljes mértékben lejár.